



Xive®

## Sofort Zähne mit System

Ästhetik sofort:

Xive® EsthetiCap Frontzahn



## Ästhetik sofort

### Xive® EsthetiCap Frontzahn

Nicht nur für den Patienten, auch für das Weichgewebe ist die Zeit zwischen Implantation und finaler Versorgung oft eine harte Zeit. Nur wenn das Provisorium der endgültigen Versorgung nahezu perfekt entspricht, kann sich das Weichgewebe optimal ausformen.

Im Idealfall lassen sich sogar die Papillen erhalten, und bei der finalen Versorgung kann die Krone stressfrei, ohne Druck oder Irritation in das Weichgewebe eingebettet werden. Späteres aufwendiges Weichgewebsmanagement lässt sich vermeiden – denn, was man erhalten kann, muss man nicht neu aufbauen! Natürlich lässt sich diese Ästhetik-Lösung mit CAD/CAM-gefertigten, provisorischen Aufbauten umsetzen!

Aber mit der EsthetiCap für das Xive-Implantatsystem können Sie das Emergenzprofil ganz einfach direkt chairside gestalten: Zwei verschiedene Durchtrittsprofile (oval und triangulär), biokompatibles zirkondioxid-verstärktes Peek und zwei Zahnfarben. So ist das Provisorium im Frontzahnbereich nicht nur Lückenfüller und Platzhalter – sondern die beste Investition in eine hochästhetische finale Versorgung.

„Ästhetik sofort“ ist eine von 6 Xive-Sofortlösungen („Provisorium sofort“, „Ästhetik sofort“, „Feste Zähne sofort“, „Passgenauigkeit sofort“, „Positionierung sofort“ und „Knochenlager sofort“), die unter dem Konzept Xive „Sofort Zähne mit System“ zusammengefasst wurden. Diese und die weiteren Sofortlösungen sind im Rahmen eines Behandlungstermins realisierbar, soweit die entsprechenden klinischen Voraussetzungen beim Patienten vorliegen.

# EsthetiCap: Step-by-Step

Die EsthetiCap ist ein anatomisch geformter Aufbau zur Anfertigung verschraubter und zementierter provisorischer Kronen oder Brücken. Sie kann als patientenindividueller Gingivaformer zur ästhetischen Ausformung von Weichgewebe angepasst werden.




Die EsthetiCap als patientenindividueller provisorischer Aufbau für die optimale Ausformung des Emergenzprofils.



*Klinischer Fall: MDT Renzo Casellini,  
Los Angeles, CA, USA*



EsthetiCap, oval und triangulär mit Schraube für EsthetiCap

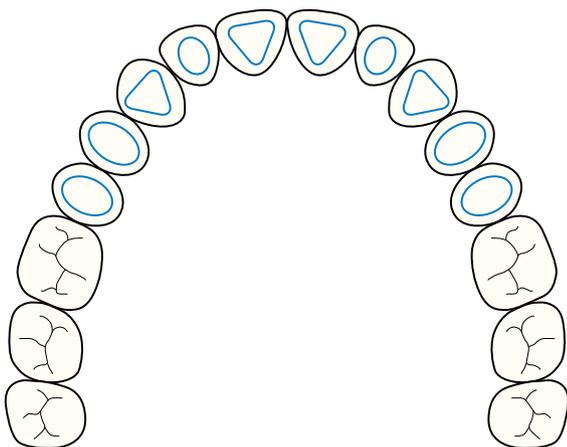

## EsthetiCap




Die EsthetiCap ermöglicht individuell geformte Provisorien sowie die Ausformung des Weichgewebes für ästhetisch anspruchsvolle Situationen.

- Für ästhetisch anspruchsvolle provisorische Kronen und Brücken
- Zwei anatomische Profile – oval und triangulär
- Individualisierbar durch Beschleifen oder Schichttechnik
- Zementierbar
- Röntgenopak durch Zusatz von Zirkondioxid
- Nicht verfügbar für Implantate D 3,0

# EsthetiCap: Step-by-Step

Aufgrund einer patentierten mit Zirkon-dioxid stabilisierten PEEK-Verbindung ist die EsthetiCap röntgenopak und leicht zu beschleifen.

## Alternative Vorgehensweise

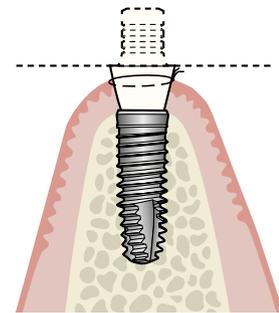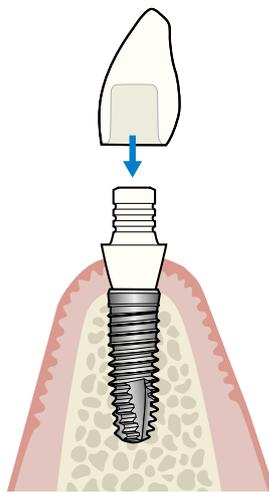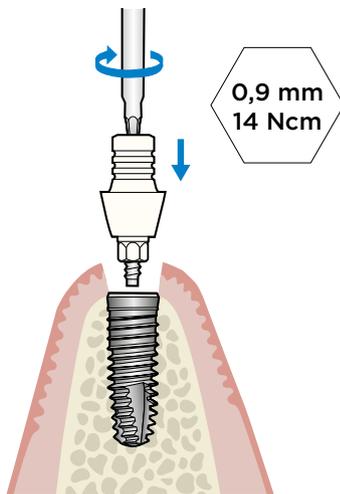

### Platzierung der EsthetiCap

Nach der Implantatfreilegung die Verschluss-Schraube mit dem Hex-Schraubendreher 0,9 mm lösen und entfernen. Die Implantat-Innen geometrie kann gereinigt und gespült werden.

Die EsthetiCap mit Hex-Schraubendreher 0,9 mm und Prothetikersche oder einem drehmomentgesteuerten Winkelstück mit Hex-Schraubendreher 0,9 mm für Winkelstück mit 14 Ncm festziehen.

### EsthetiCap als provisorische Lösung

Provisorien auf einer EsthetiCap können entweder zementiert oder direkt verblendet sein.

Die provisorische Lösung wird mit temporärem Zement zementiert. Zementreste an den Kronenrändern gründlich entfernen.

Jedes Provisorium vor der Positionierung beschleifen, damit auf die EsthetiCap kein Druck ausgeübt wird.

Eine definitive prothetische Lösung erst platzieren, nachdem das peri-implantäre Weichgewebe ohne Irritation ausgeheilt ist.

### EsthetiCap als Gingivaformer

Das Weichgewebe um die EsthetiCap herum spannungsfrei adaptieren und fest vernähen.

Bei Verwendung der EsthetiCap als Gingivaformer den Aufbau auf die entsprechende Gingivahöhe kürzen.

**Bei Verwendung der EsthetiCap als patientenindividuellen Gingivaformer kann eine optimale Ausformung des Emergenzprofils erreicht werden.**

# Klinische Dokumentation

## Anatomische Ausformung des Emergenzprofils in der ästhetischen Zone mit EstheticCap

Die Ausformung der periimplantären Weichgewebe trägt entscheidend zu einem zufriedenstellenden Ergebnis bei. Insbesondere im Frontzahnbereich sind hohe ästhetische Ansprüche zu erfüllen. Idealerweise erfolgt das Weichgewebsmanagement unmittelbar nach der Implantatinsertion, z. B. mit einer temporären Versorgung. Zur individuellen Ausformung des Austrittsprofils bietet ein Provisorium auf Basis einer EstheticCap optimale Möglichkeiten. Der anatomisch individuell präparierbare Gingivaformer aus zirkondioxidverstärktem PEEK-Kunststoff ist röntgensichtbar, zementierbar, schmiert nicht und ist somit einfach zu individualisieren durch Beschleifen oder Anschichten.

### Patientenfall: 53-jährige Patientin; Implantatkrone regio 11

Behandlungsteam: Dr. Orcan Yüksel (Frankfurt/Main) und ZTM Björn Roland (Klein-Winternheim)



In regio 11 ist ein Xive S-Implantat inseriert. Zur primären temporären Versorgung dient Gingivaformer und eine Marylandbrücke.



Indexregistrierung mit Abformpfosten zum Übertragen der klinischen Situation auf das Implantatmodell.



Herstellen des Provisoriums. Auf das modifizierte Modell wird die EstheticCap aufgesetzt. Eine Gingivamaske ermöglicht die ideale Gestaltung des Emergenzprofils.



Die auf Basis der EstheticCap hergestellte individuelle provisorische Implantatkrone mit facial gut zugänglichem Schraubenkanal.




Nach sechs Wochen entspricht das Emergenzprofil der durch das Provisorium vorgegebenen Form.



Zur Übertragung des Emergenzprofils auf das Modell wird die temporäre EstheticCap-Krone mit Silikon dupliert.


# Klinische Dokumentation

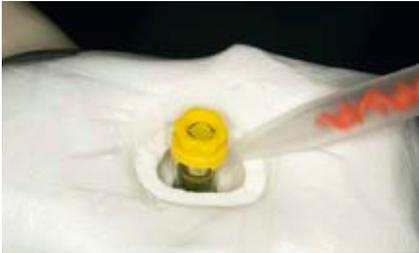

Über das Duplikat wird das Durchtrittsprofils mit Kunststoff auf den Übertragungsaufbau adaptiert.



Der modifizierte Übertragungsaufbau in regio 11 ist mit dem Implantat verschraubt. Es folgt die Überabformung.

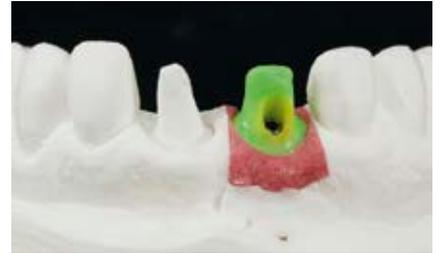

Herstellen des definitiven Aufbaus.



Das Implantatmodell ist die optimale Grundlage für die Herstellung des individuellen CAD/CAM-Abutments mit exakt definiertem Emergenzprofil.



Einbringen des Aufbaus. Das über die EstheticCap ausgeformte Weichgewebe harmonisiert perfekt mit dem basalen Bereich des Aufbaus.

# Xive® | EsthetiCap-Bestellformular

Bitte tragen Sie die Mengen ein:

## Implantate

### Xive S

				
<b>D 3,0</b>	<b>D 3,4</b>	<b>D 3,8</b>	<b>D 4,5</b>	<b>D 5,5</b>
26 - 2412 11 mm	26 - 2431 9,5 mm	26 - 2440 8 mm	26 - 2450 8 mm	26 - 2460 8 mm
26 - 2413 13 mm	26 - 2432 11 mm	26 - 2441 9,5 mm	26 - 2451 9,5 mm	26 - 2461 9,5 mm
26 - 2415 15 mm	26 - 2433 13 mm	26 - 2442 11 mm	26 - 2452 11 mm	26 - 2462 11 mm
	26 - 2435 15 mm	26 - 2443 13 mm	26 - 2453 13 mm	26 - 2463 13 mm
	26 - 2438 18 mm	26 - 2445 15 mm	26 - 2455 15 mm	26 - 2465 15 mm
		26 - 2448 18 mm	26 - 2458 18 mm	

238,00 € / Stück

### Xive Chirurgie-Kit D 3,0 - D 5,5 / S+L



|26 - 6000

1.299,00 € / Stück

## Individuelle Gingivaformer

### Friident EsthetiCap mit Schraube für EsthetiCap

	
<b>oval</b>	<b>triangulär</b>
46 - 1730 D 3,4	46 - 1745 D 3,8
46 - 1740 D 3,8	46 - 1755 D 4,5
46 - 1750 D 4,5	46 - 1765 D 5,5
46 - 1760 D 5,5	

39,00 € / Stück

## Labormaterialien

### Friident Labor-Implantat


45 - 4020 D 3,0
45 - 4030 D 3,4
45 - 4040 D 3,8
45 - 4050 D 4,5
45 - 4060 D 5,5

30,00 € / Stück

### Friident Fräsimplantat


45 - 2621 D 3,0
45 - 2631 D 3,4
45 - 2641 D 3,8
45 - 2651 D 4,5
45 - 2661 D 5,5

32,00 € / Stück

## Abformung

### Xive Übertragungsaufbau PickUp C (mit unverlierbarer Schraube)



26 - 2133 D 3,4 kurz
26 - 2135 D 3,4 lang
26 - 2143 D 3,8 kurz
26 - 2145 D 3,8 lang
26 - 2153 D 4,5 kurz
26 - 2155 D 4,5 lang
26 - 2163 D 5,5 kurz
26 - 2165 D 5,5 lang

76,50 € / Stück

### Xive Übertragungsaufbau Retention C (mit unverlierbarer Schraube)



26 - 2033 D 3,4 kurz
26 - 2035 D 3,4 lang
26 - 2043 D 3,8 kurz
26 - 2045 D 3,8 lang
26 - 2053 D 4,5 kurz
26 - 2055 D 4,5 lang
26 - 2063 D 5,5 kurz
26 - 2065 D 5,5 lang

76,50 € / Stück

## Individuelle Prothetikkomponenten

### Xive TitaniumBase mit Schraube

27 - 9040 D 3,8
27 - 9050 D 4,5
27 - 9060 D 5,5

85,00 € / Stück

### Xive ScanBase mit Schraube

27 - 9140 D 3,8
27 - 9150 D 4,5
27 - 9160 D 5,5

35,00 € / Stück

### Atlantis Abutments

- Bestellung des Zahnarztes beim Dentallabor
  - Bestellung des Zahntechnikers bei Dentsply Sirona Implants
  - Design und Fertigung bei Dentsply Sirona Implants
- Selbstdurchschreiben des Bestellformular Atlantis Abutments: |6-8510032

### Für eine perfekte Ästhetik mit Xive

|6 - 701048

Xive das ästhetische Individual-konzept

Link: Individuelle Abdrucknahme Schritt für Schritt

|8 - 701007

3 Plättchen für individuelle Abdrucknahme

Link: Erstellung einer Versorgung mit der Xive TitaniumBase

### Universal Haltegriff zum Beschleifen



|22740  
103,00 € / Stück

**Senden Sie Ihre persönliche Bestellung per Fax: 0049 (0) 621 4302-011**

DENTSPLY IH GmbH · Zweigniederlassung Mannheim · Postfach 71 01 11 · D-68221 Mannheim · www.dentsplysirona.com

Name\* \_\_\_\_\_

Straße/PLZ/Ort\* \_\_\_\_\_

Telefon/Fax\* \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Kaufdatum/Unterschrift\* \_\_\_\_\_

Praxisstempel

Kundennummer  
\*Pflichtfelder

Es gelten die Einkaufs- und Bestellbedingungen sowie die Rücksendebedingungen der DENTSPLY IH GmbH (einzusehen unter: www.dentsplysirona.com/implants/agn)



## Über Dentsply Sirona Implants

Dentsply Sirona Implants bietet umfassende Lösungen für alle Phasen der Implantattherapie an. Dazu gehören sowohl die Implantatsysteme Ankylos®, Astra Tech Implant System® und Xive® als auch digitale Technologien wie patientenindividuelle Lösungen mit Atlantis® sowie Simplant® für die computer-gestützte Implantologie.

Des Weiteren sind regenerative Lösungen mit Symbios®, Programme zur beruflichen Fortbildung und Weiterentwicklung sowie professionelle Marketingleistungen für Praxen und Labore unter der Marke STEPPS™ im Portfolio. Dentsply Sirona Implants schafft einen Mehrwert für Zahnärzte und Zahntechniker und ermöglicht vorhersagbare und dauerhafte Ergebnisse in der Implantatbehandlung, die zu einer höheren Lebensqualität für Patienten führen.

Weitere Informationen zu Dentsply Sirona Implants finden Sie unter [www.dentsplysirona.com/implants](http://www.dentsplysirona.com/implants).

**Hersteller:** DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH · Postfach 71 01 11  
68221 Mannheim/Deutschland · Tel. 0621 4302-000 · Fax 0621 4302-001  
E-Mail: [implants-info@dentsplysirona.com](mailto:implants-info@dentsplysirona.com) · [www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)

**Vertrieb Deutschland:** DENTSPLY IH GmbH · Postfach 71 01 11  
68221 Mannheim · Tel. 0621 4302-006 · Fax 0621 4302-007  
E-Mail: [implants-de-info@dentsplysirona.com](mailto:implants-de-info@dentsplysirona.com) · [www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)

**Vertrieb Österreich:** Dentsply Sirona Europe GmbH · Zweigniederlassung Wien  
Wienerbergstraße 11 / Turm A / 27. Stock · 1100 Wien  
Tel. 01 600 4930-301 · Fax 01 600 4930-381  
E-Mail: [bestellung.austria@dentsplysirona.com](mailto:bestellung.austria@dentsplysirona.com)

**Vertrieb Schweiz:** DENTSPLY IH SA · Rue Galilée 6, CEI 3, Y-Parc  
1400 Yverdon-les-Bains · Tel. 0800 845844 · Fax: 0800 845845  
E-Mail: [implants-ch-info@dentsplysirona.com](mailto:implants-ch-info@dentsplysirona.com)

## Über Dentsply Sirona

Dentsply Sirona ist der weltweit größte Hersteller von Dentalprodukten und -technologien, mit einer 130-jährigen Unternehmensgeschichte, die von Innovationen und Service für die Dentalbranche und Patienten überall auf der Welt geprägt ist. Dentsply Sirona entwickelt, fertigt und vertreibt umfassende Lösungen, Produkte zur Zahn- und Mundgesundheit sowie medizinische Verbrauchsmaterialien, die Teil eines starken Markenportfolios sind.

Dentsply Sirona, The Dental Solutions Company™, liefert innovative und effektive, qualitativ hochwertige Lösungen, um die Patientenversorgung zu verbessern und für eine bessere, schnellere und sicherere Zahnheilkunde zu sorgen. Der weltweite Firmensitz des Unternehmens befindet sich in York (US-Bundesstaat Pennsylvania), und die internationale Zentrale ist in Salzburg (Österreich) angesiedelt. Die Aktien des Unternehmens sind an der NASDAQ unter dem Kürzel XRAY notiert.

Weitere Informationen zu Dentsply Sirona und die Produktpalette finden Sie unter [www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com).